

# CONFIGURE SU PROCEDIMIENTO PARA UNA **MAYOR PREDECIBILIDAD.**

Sistema de ablación Emprint™  
con tecnología Thermosphere™



# GUÍA DE REFERENCIA PARA LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA\*



1 Encienda el generador Emprint™



2 Localice el cable reutilizable (no estéril)



3 Conecte el cable reutilizable al generador



4 Extraiga la antena del envase



5 Abra la tapa transparente del cabezal de la bomba



6 Introduzca la sección de la sonda naranja de modo que las flechas de dirección coincidan con las de la bomba



7 Cierre la tapa del cabezal de la bomba




8 Retire el tapón blanco de la boquilla para bolsas IV



9 Introduzca la boquilla para bolsas en el puerto de una bolsa con solución salina estéril para administración IV de 1 L o más




10 Presione suavemente los laterales de la cámara hasta que la mitad se llene de solución salina

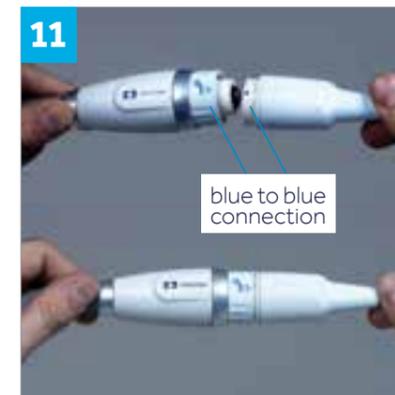

11 Acople el conector de antena al cable reutilizable



12 Para activar la bomba, pulse el interruptor de arranque/paro de la bomba

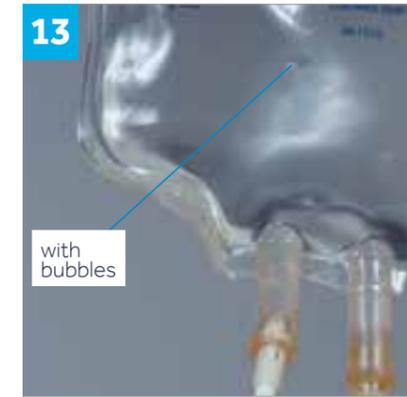

13 Deje que la bomba cebe la antena con líquido hasta que no queden burbujas ni en la sonda ni en la solución IV



14 Configure en el generador la potencia deseada



15 Configure en el generador la duración deseada



16 Pulse ARRANQUE/PARO para comenzar la ablación

\*Refer to Emprint™ Ablation System User's Guide for complete setup instructions.

# PROCEDIMIENTOS DE ALERTA

ALERTA	CAUSA	SOLUCIÓN
<b>Antena no identificada</b> 	<b>Significado:</b> Esta advertencia se activa cuando la antena no está conectada correctamente. <b>Respuesta del generador:</b> El generador no activará la potencia de Microondas.	Compruebe las conexiones entre la antena y el generador. Sustituya la antena si una conexión segura no soluciona la alerta
<b>Circuito de potencia reflejada</b> 	<b>Significado:</b> La potencia reflejada es inusualmente alta. Indicación de que el dispositivo se ha activado en presencia de aire. <b>Respuesta del generador:</b> Se desactiva la administración de potencia de microondas hasta que se resuelve el problema.	Compruebe que la antena está situada sobre el tejido antes de activarla. Si la antena está correctamente situada, puede significar que está dañada y debe sustituirse antes de continuar. Cancele la alarma pulsando REINICIAR y, a continuación, continúe con el procedimiento
<b>Límite de temperatura de antena superado</b> 	<b>Significado:</b> La temperatura interna de la antena ha superado el límite. <b>Respuesta del generador:</b> Se desactiva la administración de microondas hasta que la temperatura interna desciende a menos de 45 °C.	Compruebe que el sistema de refrigeración está activado y que el flujo de la solución salina no está obstruido. Cancele la alarma pulsando REINICIAR y, a continuación, continúe con el procedimiento
<b>Alarma de circuito RTP</b> 	<b>Significado:</b> Se ha activado la función de apagado RTP y la temperatura medida en la sonda ha alcanzado o superado 45 °C durante la ablación. <b>Respuesta del generador:</b> Se desactiva la administración de potencia de microondas.	Cuando la temperatura medida en la sonda sea inferior a 45 °C, cancele la alarma pulsando REINICIAR. Después, continúe con el procedimiento.
<b>Advertencia general</b> 	<b>Significado:</b> El generador ha detectado un fallo. <b>Respuesta del generador:</b> La potencia de este circuito está desactivada.	Reinicie el generador. Si el problema persiste, apague el generador por completo durante 10 minutos. Si el problema persiste pasados 10 minutos, apáguelo y consulte con el departamento de ventas y mantenimiento de Medtronic.
<b>Control externo</b> 	<b>Significado:</b> Para acceder al control externo y activarlo, es preciso retirar el panel del control externo. Uso exclusivo por parte del servicio técnico de Medtronic.	
<b>Funcionamiento manual</b> 	<b>Significado:</b> Para acceder a la opción de funcionamiento manual, es preciso retirar la tapa del puerto de mantenimiento. Uso exclusivo por parte del servicio técnico de Medtronic.	
<b>Interruptor cerrado</b> 	<b>Significado:</b> El indicador de interruptor cerrado se ilumina cuando el botón o pedal de arranque/paro se mantiene pulsado.	

**IMPORTANTE:** consulte el prospecto del envase para ver todas las instrucciones, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones

© 2016 Medtronic. Todos los derechos reservados. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. <sup>TM</sup>\* Las marcas de terceros son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa Medtronic.  
 16-eu-emprint-alert-procedural-card-es-1308609

**Medtronic**

Medtronic Iberica SA

Calle María de Portugal,  
 Madrid 28050  
 España

+34 91 625 04 00 [T]  
 +34 91 650 74 10 [F]

World Trade Center Almeda Park,  
 Pça. De la Pau s/n Edificio 7, planta 3ª,  
 08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona  
 España

+34 93 475 86 10 [T]  
 +34 93 477 10 17 [F]

**medtronic.com**